

INDICATIONS COMPRESSION EASYCRY'EAU

PATHOLOGIES	PRESSION MM DE HG (<i>mercure</i>)			EAU renouvelée toutes les 30 sec pendant : (10/15/20 sec)		
	FAIBLE 15	MOYENNE 50	FORTE 75	10 SEC	15 SEC	20 SEC
Récupération			X	X		
Post-Op (15 mmHg si sensible)		X				X
Tendinopathies		X			X	
Déchirures, Entorses, Contractures, Hématomes (15 mmHg si sensible)		X				X
Pathologies abarticulaires Genou, cheville, coude		X		X		
Pathologies Epau	X				X	
Fonctions Inf/Déf (mode dynamique) Travail à Pression fixée qui reste stable pendant 2 minutes, puis se dégonfle à 5 mm hg pendant 1 minute et le cycle recommence.			X			X